

主机、传感器和配件
进一步使用说明可以在主机中找到。按菜单按钮并选择”帮助”。

X2 VIEW
可以在项目的”帮助”菜单中或通过按 F1 来访问 X2 View 帮助。

校准日期
按连接的传感器的”i”图标以获取校准日期，此图标可在主机设置屏幕中找到。

测量规范
当查看单个参数时，向右滑动以读取该参数的测量规范。有关完整的仪表规范，请访问 <http://www.raysafe.com>。

技术支持
如果您有任何疑问，请告知我们的支持服务部。有关联系方式，请访问 <http://www.raysafe.com>。

请注意！根据所购买的型号，内容可能有所不同。


© 2018.01 Unifors RaySafe 5001112-1.00

RaySafe X2 Solo




入门


注意! 要更改主机语言, 从主屏幕 (设置屏幕) 中向右滑动, 按 X2 Base Unit, 选择语言。

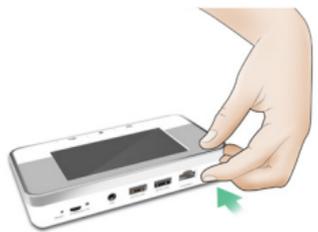

打开主机

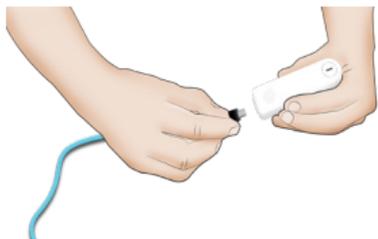

连接传感器

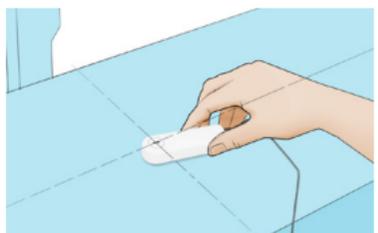

位置和曝光

操作主机



短按电源按钮以进入休眠模式。在休眠模式片刻后, 主机将自动关闭。
长按电源按钮 2 秒钟以立即关闭主机。




在屏幕上侧滑以访问不同的视图。
上下滑动以在测量值间滚动。



点选一个参数放大数字。向右滑动以查看含有测量规范的参数信息, 向左滑动以查看波形, 是否适用于当前参数。

关于 RaySafe X2 View

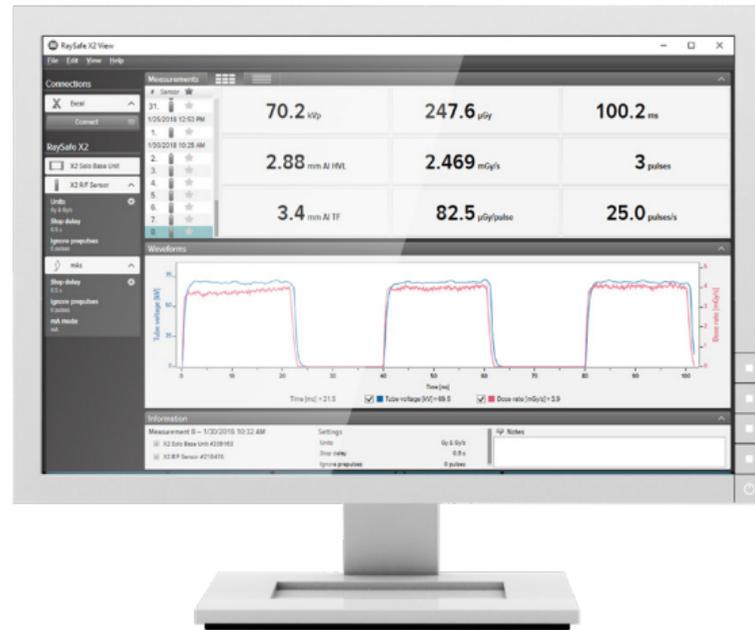

连接至运行 X2 View 的电脑上:

- 导入保存的测量值
- 分析波形
- 获取软件更新
- 导出到 Excel®